




Ansetzen der A°-Wipes Eimer mit 1,5 L angesetzter Gebrauchslösung eines Flächendesinfektionsmittel-Konzentrates



- 1) Arbeitsmittel bereitstellen und Schutzkleidung anlegen:**
A°-Wipes-Eimer & -Tuchrolle, Flächendesinfektionsmittel, Schutzhandschuhe & -brille, 2 L Messbecher und 50 ml Messbecher, Permanentmarker

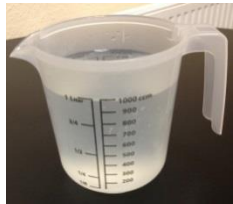

- 2) Benötigte Menge an kaltem Wasser abmessen.**
Beachte: Von der Gesamtmenge der Desinfektionslösung (= 1,5 L) muss die Menge an Desinfektionsmittel abgezogen werden, um die tatsächliche Menge an Wasser zu erhalten. (z.B. 1,5 Liter einer 2 %igen Lösung = 30 ml Desinfektionsmittel + 1470 ml Wasser)



- 3) Flächendesinfektion gemäß Desinfektionsplan abmessen...**



... und in das kalte Wasser geben.



- 4) Trockene A°-Wipes-Tuchrolle in einen neuen oder den aufbereiteten Eimer geben, erstes Tuch aus der Mitte der Rolle ein kleines Stück herausziehen.**



- 5) Tuchrolle mit der angesetzten Desinfektionslösung langsam von der Mitte nach außen übergießen.**



- 6) Anfangstuch durch die Deckelöffnung ziehen und den Deckel fest verschließen.**



- 7) Die Lösung mindestens 30 min einwirken lassen. Anfangstuch verwerfen.**



- 8) Aufkleber mit wasserfestem Permanentmarker beschriften:**
Produkt: z.B. **Biguacid S**
Charge: z.B. **14005**
Konzentration: **2 %**
Einwirkzeit: z.B. **5 min**
Desinfektionsmittel eingefüllt am: „heutiges Datum“
verwendbar bis: „heutiges Datum + **Standzeit** je nach Produkt“