

# Biguacid-S



## Aldehydfreies Konzentrat für die Flächendesinfektion mit hervorragender Reinigungsleistung und besonders effizienten Anwendungskonzentrationen

### ANWENDUNGSBEREICHE:

Notwendiges wirtschaftliches Denken fordert von einem modernen Flächendesinfektionsmittel kurze Einwirkzeiten bei möglichst niedriger Anwendungskonzentration. Biguacid-S gewährt höchste Effizienz und enthält zugleich Wirkstoffe, die verlässlich und schnell wirken. Das Produkt zeichnet sich durch einen guten Reinigungseffekt und einen angenehmen Geruch aus.

Biguacid-S eignet sich zur gezielten und routinemäßigen Wischdesinfektion und Reinigung – auch bei **hoher Belastung** – von Oberflächen und medizinischem Inventar wie z. B. Bettgestelle, OP-Tische, Untersuchungsliegen, Nachttische etc. in allen Funktionsbereichen des Krankenhauses, in Arzt- und Zahnarztpraxen sowie in Sekundärbereichen der Humanmedizin.

Des Weiteren kann Biguacid-S zur Reinigung und Desinfektion von Wänden, Fußböden, Nassbereichen und anderen abwischbaren Oberflächen wie Handläufe, Türklinken etc. eingesetzt werden.

Besonders hervorzuheben ist die **herausragende Reinigungsleistung**, die das Produkt zu einem idealen Reinigungs- und Desinfektionsmittel für die **Lebensmittelindustrie** und lebensmittelverarbeitende Bereiche macht.

Bei einem gewünschten Rezepturwechsel in der Pharmaindustrie kann Descocid®-N im Abtausch eingesetzt werden.

### ANWENDUNGSEMPFEHLUNG:

Prüfung	Konzentration	Einwirkzeit
<b>VAH – Flächendesinfektion mit Mechanik   VAH-Standardmethoden</b>		
VAH – Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid geringe und hohe organische Belastung (äquivalent zu EN 13727, EN 13624, EN 16615)	2,0 %	5 min
	0,25 %	60 min
Flächendesinfektion: bakterizid, levurozid geringe und hohe organische Belastung (äquivalent zu EN 13727, EN 13624, EN 16615)	1,0 %	15 min
	0,5 %	30 min
<b>EN-Methoden – Flächendesinfektion ohne Mechanik in den Bereichen Lebensmittel, Industrie, Haushalt und öffentliche Einrichtungen</b>		
EN 1276 (Phase 2 / Stufe 1) – bakterizid hohe organische Belastung	0,1 %	5 min
	0,025 %	30 min
EN 1650 (Phase 2 / Stufe 1) – levurozid hohe organische Belastung	0,05 %	15 min
	0,025 %	30 min
<b>EN 13697</b> (Phase 2 / Stufe 2) – bakterizid, levurozid hohe organische Belastung	2,0 %	30 min
	1,0 %	60 min
<b>DVV / RKI-Leitlinie – viruzide Wirkung</b>		
<b>begrenzt viruzid*</b> (VAH gelistet) (inkl. HIV / HBV / HCV)	2,0 %	5 min
	1,0 %	15 min
	0,5 %	30 min
Vacciniavirus	2,0 %	5 min
	1,0 %	15 min
	0,5 %	30 min
BVDV (Bovine Viral Diarrhea Virus)	2,0 %	5 min
	1,0 %	15 min
	0,5 %	30 min
Coronavirus (SARS)	2,00 %	5 min

\*gemäß DVV/RKI-Stellungnahme, Bundesgesundheitsblatt 3/2017

### ZUSAMMENSETZUNG (WIRKSTOFFE):

100 g enthalten:  
17,5 g Didecylidimethylammoniumchlorid  
4,0 g Polyhexanide

### LISTUNG:

- VAH-Liste
- ÖGHMP-Liste

## Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der **Verordnung (EU) 2017/745** des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Tel.: +49 30 77 99 2 0, Fax: +49 30 77 99 22 19, www.lysoform.de



**ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH**  
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7  
Tel.: +49 2234 984 66 0, Fax: +49 2234 984 66 11  
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Vertrieb in Österreich (nach EN ISO 9001 zertifiziert):

**ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH**  
A-1090 Wien, Frankgasse 6/ Top 5  
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66  
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

## ANWENDUNG:

### Flächendesinfektion mit Mechanik; Scheuer-Wischdesinfektion:

Konzentrat je nach Anwendung mit Wasser verdünnen. Eine ausreichende Menge (Nass-Wischen) der angesetzten Gebrauchslösung durch eine Scheuer-Wisch-Desinfektion auf die Oberfläche aufbringen und mechanisch verteilen. Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

### Flächendesinfektion ohne Mechanik gemäß EN-Methoden:

Konzentrat je nach Anwendung mit Wasser verdünnen. Oberfläche vollständig mit der angesetzten Gebrauchslösung benetzen und gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen. Lebensmittelberührende Oberflächen sind nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser von mindestens Trinkwasserqualität nachzuspülen.

Starke Verunreinigungen durch z. B. Blut, Erbrochenes o. ä. sind vor der Desinfektion mit einem mit Desinfektionsmittel getränkten Einwegtuch aufzunehmen und sachgerecht zu entsorgen.

Angesetzte Desinfektionsmittellösungen dürfen nicht über längere Zeit offen stehen bleiben und sind gemäß VAH- und RKI-Empfehlungen mindestens arbeitstäglich zu erneuern.

### In Kombination mit dem Tuchspendersystem A°-Wipes:

Biguacid-S kann mit einer Standzeit von bis zu 28 Tagen im Tuchspendersystem A°-Wipes unter Beachtung der besonderen Hinweise zur Handhabung eingesetzt werden. Bitte beachten Sie des Weiteren die Hinweise auf dem Produktinformationsblatt der A°-Wipes sowie die VAH-Empfehlungen zum sachgerechten Gebrauch und zur Aufbereitung von Tuchspendersystemen.

## BESONDERE EIGENSCHAFTEN:

- für den Einsatz in den Tuchspendersystemen **A°-Wipes** und **Kimtech\* Wettask\* DS** bis zu 28 Tage geeignet
- sehr gute Reinigungsleistung
- flexibler Einsatz auch bei hoher Belastung
- besonders wirtschaftlich durch geringe Einsatzkonzentrationen
- breites Wirkungsspektrum
- angenehmer Geruch

## BESONDERE HINWEISE:

- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen (gem. BGI).
- Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung beachten.
- Kontakt mit Augen, Haut und Schleimhaut vermeiden. Nicht einatmen.
- Bei einem Ersteinsatz oder Präparatewechsel sind die Oberflächen, Eimer und Wischutensilien gründlich zu reinigen und zu spülen.
- Nicht mit anderen Präparaten mischen (z. B. Aldehyde, anionische Tenside).
- Bitte beachten Sie die RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (BuGBl 47/2004) sowie die Empfehlung des VAH und IHO zur Flächendesinfektion!
- Eine exakte Dosierung ist Voraussetzung für eine wirksame Desinfektion. Zur exakten Dosierung beim Ansetzen der Gebrauchslösung Dosiertabelle und Dosierbecher, -pumpen oder -geräte zu Hilfe nehmen.
- Kein heißes Wasser zum Ansetzen der Gebrauchslösung verwenden.
- Auf eine ausreichende Belüftung achten.

## WIRKUNGSSPEKTRUM:

- bakterizid
- levurozid
- begrenzt viruzid\*

## PHYSIKALISCHE UND CHEMISCHE EIGENSCHAFTEN:

Aussehen:	klare, blaue Flüssigkeit
Geruch:	angenehm
pH-Wert:	ca. 6,5 bei 20 °C
Dichte:	ca. 1,004 g/cm <sup>3</sup> bei 20 °C
Flammpunkt:	55 °C gem. DIN 51755

## LIEFERFORMEN:

- Karton mit 6 x 1 L Dosierflaschen
- Karton mit 2 x 5 L Kanistern

zusätzlich lieferbar:

- diverse Dosierhilfen zum Aufschrauben auf Flaschen und Kanister

## PHARMAZENTRALNUMMER:

- 1 L: PZN 12471087

Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Desinfektionsmittel vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Flächendesinfektionsmittel für Medizinprodukte gemäß Verordnung (EU) 2017/745 „Medizinprodukteverordnung“.

# CE 0482

Biozid gem. Biozid-Verordnung  
BAuA Reg.-Nr.: N-52503; N-52502

## Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der **Verordnung (EU) 2017/745** des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte.

Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Tel.: +49 30 77 99 2 0, Fax: +49 30 77 99 22 19, [www.lysoform.de](http://www.lysoform.de)



**ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH**  
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7  
Tel.: +49 2234 984 66 0, Fax: +49 2234 984 66 11  
Mail: [info@antiseptica.com](mailto:info@antiseptica.com), [www.antiseptica.com](http://www.antiseptica.com)

Vertrieb in Österreich (nach EN ISO 9001 zertifiziert):

**ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH**  
A-1090 Wien, Frankgasse 6/ Top 5  
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66  
Mail: [office@antiseptica.at](mailto:office@antiseptica.at), [www.antiseptica.at](http://www.antiseptica.at)