

Dosiertabelle für das Instrumentendesinfektionsmittel Descogen®-I

Menge der gebrauchsferti- gen Lösung	Descogen®-I		Einwirkzeiten (EWZ)				
	1,5%	0,5%	bakterizid / levurozid		tuberkulozid	viruzid	sporizid
			EWZ (1,5 %)	EWZ (0,5 %)	EWZ (1,5 %)	EWZ (1,5 %)	EWZ (1,5 %)
1 l	15 ml (≈15 g)	5 ml (≈5 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
2 l	30 ml (≈30 g)	10 ml (≈10 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
4 l	60 ml (≈60 g)	20 ml (≈20 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
8 l	120 ml (≈120 g)	40 ml (≈40 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
10 l	150 ml (≈150 g)	50 ml (≈50 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min
20 l	300 ml (≈300 g)	100 ml (≈100 g)	15 min	60 min	60 min	15 min	60 min

Anwendung:

Von der gewünschten Menge der gebrauchsfertigen Lösung (1. Spalte in der Tabelle) muss die Menge an Desinfektionsmittel abgezogen werden, um die tatsächliche Menge an Wasser zu erhalten.

Beispiel: 1 L gebrauchsfertige Lösung = 985 ml Wasser + 15 ml Desinfektionsmittel)

Zuerst das Wasser einfüllen. Anschließend das Desinfektionsmittel hinzugeben.

Benötigtes Granulat (30 ml ≈ 30 g) abwiegen oder mit dem Messlöffel (mit Skalierung, Gesamtvolumen 30 ml) abmessen.

Mehrmals umrühren, bis sich das Granulat vollständig aufgelöst hat.

Die gebrauchsfertige Lösung sollte arbeitstäglich frisch angesetzt werden.

(Hinweis: kein heißes Wasser verwenden!)