

Ethisol® Plus Wipes

ANTISEPTICA
Hygiene-Lösungen seit 1976
Solutions for Hygiene since 1976



viruzide, gebrauchsfertige, alkoholhaltige Desinfektions- und Reinigungstücher zur Desinfektion von alkoholbeständigen Oberflächen – im praktischen Flowpack

Anwendungsbereiche:

Ethisol® Plus Wipes sind **gebrauchsfertige, alkoholhaltige** Tücher zur Schnelldesinfektion und Reinigung von alkoholunempfindlichem medizinischen Inventar und Flächen aller Art. Die Tücher können einzeln hygienisch aus dem praktischen Flowpack entnommen werden und sind für den Einmalgebrauch konzipiert, der die Hygienesicherheit gewährleistet.

Ethisol® Plus Wipes eignen sich für die Desinfektion und Reinigung sämtlicher Oberflächen im Wartezimmer von Arzt- und Zahnarztpraxen, in Alten- und Pflegeheimen, Schulen und Kindergärten sowie allen öffentlichen Einrichtungen.

Sämtliche alkoholbeständigen Flächen

- in Laboren und Diagnostikzentren
- in der Pharma- und Kosmetikindustrie
- bei Friseuren, Fußpflegern, Nagelstudios, Tätowierern etc.

können aufgrund der aldehyd- und farbstofffreien Tränklüssigkeit der Ethisol® Plus Wipes schnell, umfassend und wirkungsvoll desinfiziert und gereinigt werden.

Dies gilt speziell für Flächen mit häufigem Handkontakt wie Türklinken, Treppengeländer und Handläufe, Tische und Stühle, Ablageflächen, aber auch für sanitäre Anlagen, Fußböden etc.

Ethisol® Plus Wipes bestehen aus hochwertigem und reißfestem Biocell-Material, sind zu 100% biologisch abbaubar und belasten nicht die Umwelt.

Anwendungsempfehlung:

Prüfung (Wirkstofflösung)	Einwirkzeit
Flächendesinfektion mit Mechanik gemäß VAH-Verfahren 2015, hohe Belastung	
bakterizid, levurozid	5 min
DVV-Leitlinie**	
begrenzt viruzid*	1 min
begrenzt viruzid PLUS*	1 min
Euro-Normen**	
EN 16615 bakterizid + levurozid (hohe Belastung)	1 min
EN 14348 mykobakterizid (hohe Belastung)	1 min
EN 13624 fungizid (hohe Belastung)	5 min
EN 14476 viruzid* (geringe Belastung)	5 min

* gemäß DVV/RKI-Stellungnahme Bundesgesundheitsblatt 3/2017
** Untersuchungen beziehen sich auf die Tränklösung

Besondere Eigenschaften:

- einfache, praktikable Anwendung
- vielseitig und flexibel einsetzbar
- sehr schnelle Wirksamkeit
- frei von Aldehyden und Farbstoffen
- angenehmer Geruch
- gute Reinigungsleistung

Zusammensetzung (Wirkstoffe):

100 g Tränklösung enthalten:
63,5 g Ethanol
0,05 g Didecylidimethylammonium-Chlorid

Listung:

- VAH-Liste
- IHO-Listung

Wirkungsspektrum:

- bakterizid
- levurozid / fungizid
- tuberkulozid / mykobakterizid
- **viruzid***
- geprüft nach **4-Felder-Test**

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49 2234 98466-0, Fax: +49 2234 98466-11
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Vertrieb in Österreich (NICHT nach EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at

Ethisol® Plus Wipes

Anwendung:

Tücher einzeln entnehmen; Flowpack anschließend wieder gut verschließen, um das vorzeitige Austrocknen der Tücher zu vermeiden.

Flächendesinfektion mit Mechanik; Scheuer-Wischdesinfektion:

Die Oberfläche vollständig mit dem gebrauchsfertigen Desinfektionstuch abwischen (Scheuer-Wisch-Desinfektion).

Auf eine vollständige, lückenlose Benetzung achten; gegebenenfalls mehrere Tücher verwenden (Nass-Wischen). Tränklösung gemäß Anwendungsempfehlung einwirken lassen.

Lebensmittelberührende Oberflächen sind nach Ablauf der Einwirkzeit mit klarem Wasser von mindestens Trinkwasserqualität nachzuspülen.

Starke Verunreinigungen durch z. B. Blut, Erbrochenes o. ä. sind vor der Desinfektion mechanisch zu entfernen (z. B. mit Ly-Dry von Lysoform)

Besondere Hinweise:

- Von Zündquellen fernhalten; nicht rauchen. Heiße Flächen vor der Desinfektion abkühlen lassen. Elektrische Geräte ausschalten und auf einen spannungsfreien Zustand achten.
- Enthält flüchtige Substanzen. Auf eine ausreichende Belüftung achten.
- Zur Desinfektion alkoholempfindlicher Flächen (z. B. Acrylglas, alkohollösliche Lacke) nicht geeignet.
- Kontakt mit Augen, Schleimhaut und offenen Wunden vermeiden.
- Beim Umgang mit Desinfektionsmitteln ist eine geeignete persönliche Schutzausrüstung zu tragen (gem. TRBA 250).

- Sicherheitsdatenblatt und Betriebsanweisung beachten.
- Bei Ersteinsetz oder Präparatewechsel sind die Oberflächen gründlich zu reinigen und zu spülen.
- Bitte beachten Sie die RKI-Empfehlung „Anforderungen an die Hygiene bei der Reinigung und Desinfektion von Flächen“ (BuGBl 10/2022) sowie die Empfehlung des VAH und IHO zur Flächendesinfektion!
- Die Ethisol® Plus Wipes sind nach Anbruch im verschlossenen Flowpack bis zu 28 Tage haltbar.

Physikalische und chemische Eigenschaften:

Geruch: charakteristisch

pH-Wert: 9,5 - 10,8 bei 20 °C

Dichte: 0,88 - 0,89 g/cm³ bei 20 °C

Flammpunkt: 21 °C gem. DIN 51755

Lieferformen:

Karton mit 12 Flowpacks à 80 Tüchern

Beim Umgang mit dem Produkt sind die Hinweise gemäß Gefahrstoffverordnung im EG-Sicherheitsdatenblatt zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf Anfrage bei Ihrem Fachberater oder auf unserer Homepage.

Biozidprodukte vorsichtig verwenden.

Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformation lesen.

Biozid gem. Biozid-Verordnung
BAuA Reg.-Nr.: N-71859

Antisepsis by Antiseptica – Antisepsis mit Vernunft

Das Unternehmen ist zertifiziert nach **EN ISO 13485** und erfüllt die Anforderungen der Verordnung **(EU) 2017/745** des Europäischen Rates über Medizinprodukte.



🏢 **Lysoform Dr. Hans Rosemann GmbH**, Kaiser-Wilhelm-Straße 133, D-12247 Berlin, Telefon: +49 30 77992-0, Fax: +49 30 77992-219
www.lysoform.de

ANTISEPTICA Dr. Hans-Joachim Molitor GmbH
D-50259 Pulheim, Carl-Friedrich-Gauß-Straße 7
Tel.: +49 2234 98466-0, Fax: +49 2234 98466-11
Mail: info@antiseptica.com, www.antiseptica.com

Vertrieb in Österreich (NICHT nach EN ISO 13485 und Richtlinie 93/42/EWG zertifiziert):
ANTISEPTICA chem.-pharm. Produkte GmbH
A-1020 Wien, Frankgasse 6 / Top 5
Tel.: +43 1 374 66 00, Fax: +43 1 374 66 00 66
Mail: office@antiseptica.at, www.antiseptica.at